


1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™ Edición Works

Maximice el rendimiento con un tiempo de escaneo un 30% más rápido de media

Un tiempo de escaneo más rápido conduce a un mayor rendimiento

- Obtenga capacidades clínicas avanzadas y una productividad mejorada con SIGNA™ Works
- Mejore la SNR hasta un 27% con la tecnología de RF óptica (OpTix RF)*
- Acelere el tiempo de los exámenes hasta un 50% con HyperWorks
- Velocidad avanzada de reconstrucción de imágenes con el más actual motor de reconstrucción

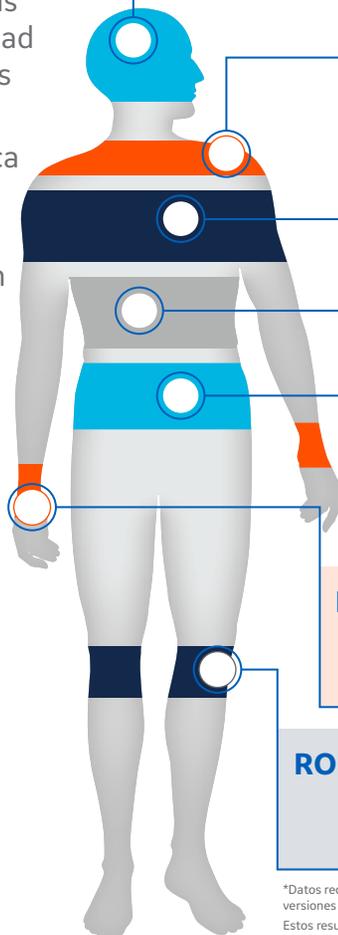

	Secuencias individuales	Tiempo del SIGNA™ HDxt (minutos)	Tiempo del SIGNA™ Edición Works (minutos)	Reducción de tiempo (min,%)
CEREBRO	FLAIR T1 Sagital HÉLICE T2 Axial EMPUJE T2 Axial DWI b1000 Axial 3D TOF FS Axial T1 FSE Axial	14:09	9:19	4:50 34%
HOMBRO	T2 FS Coronal T1 Coronal DP FS Sagital DP FS Axial FUSIÓN 3D Axial	23:24	16:12	7:12 31%
COLUMNA-C	T2 Sagital T1 Sagital STIR Sagital FUSIÓN 3D Axial T1 FSE-Flex Sagital	18:31	10:59	7:32 41%
COLUMNA-T	T2 Sagital T1 Sagital T2 Axial T1 Axial	18:10	10:10	8:00 44%
COLUMNA-L	T2 Sagital T1 Sagital T2 Axial	11:22	7:44	3:38 32%
MUÑECA	DP Coronal DP FSE-Flex Coronal DP FS Axial T1 Sagital FUSIÓN 3D Coronal	23:07	13:56	9:11 40%
RODILLA	DP Sagital DP FS Sagital T1 Coronal DP FS Coronal DP FS Axial	14:25	10:02	4:23 30%



*Datos recopilados con el software SIGNA™ HDxt 16x y SIGNA™ HDxt SIGNA™ Edición Works. Los mismos parámetros de protocolo en ambas versiones del sistema, incluidas las mejoras y funciones más recientes en SIGNA™ Edición Works.

Estos resultados son solo para fines ilustrativos. Pueden variar según los protocolos y las circunstancias seleccionados por el cliente.

1) La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación restringida en su país.

2) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.

© 2021 General Electric Company. SIGNA es una marca comercial de General Electric Company

JB00544XL